

Manual de utilizare cheie dinamometrică implanturi C-TW1

【Precauții】

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.
- Verificați cheia dinamometrică înainte de utilizare pentru a vă asigura că nu este deteriorată și că nu îi lipsește nicio componentă; dacă este cazul, contactați dealerul sau producătorul.
- Sângele rămas în cheie poate duce la o funcționare defectuoasă.
- Este interzis ca utilizatorii sau alte persoane neautorizate de către compania noastră să dezassembleze și să assembleze cheia pe cont propriu.
- Se recomandă utilizarea accesoriilor originale.
- Nu acționați butonul de apăsare în timpul funcționării pentru a preveni căderea instrumentului rotativ și provocarea accidentelor medicale.
- Pentru a garanta acuratețea valorii cuplului, este indicat să trimiteți instrumentul la distribuitor sau producător pentru recalibrare la fiecare doi ani.

【Contraindicații】

- Utilizați cu precauție în cazul femeilor însărcinate, copiilor și persoanelor care au avut probleme cu retina.
- Acest dispozitiv nu este recomandat pentru medicii care au un stimulator cardiac sau orice alt dispozitiv electric

【Utilizare preconizată】

- Cheia dinamometrică este folosită pentru a îndeplini cerințele specifice în chirurgia dentară, cum ar fi tratamentul smalțului și dentinei, precum și tăierea coroanelor dentare.
- Cheia dinamometrică este destinată utilizării exclusiv în clinici stomatologice sau spitale de către personalul medical calificat.


【Lista de produse】

Piesă contraunghi, mâner, mandrină, racord lubrifiant

【Instalare și operare】

1. Instalare/Dezasamblare:

- Introduceți piesa contraunghi de strângere în mâner.

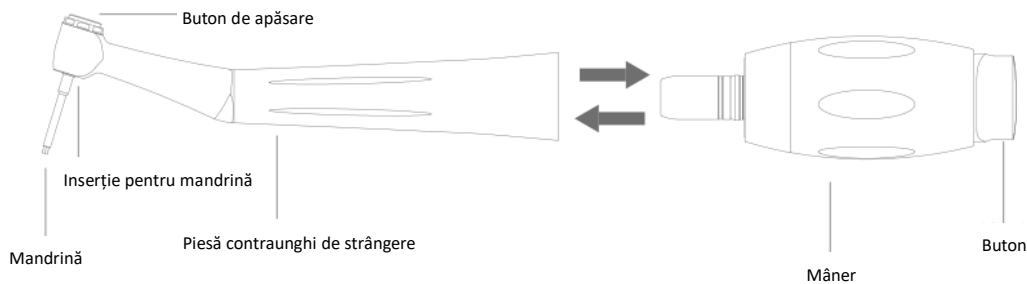


2. Pentru a introduce și strânge mandrina

- Poziționați instrumentul rotindu-l ușor în ambele direcții, apoi exercitați presiune cu degetul mare asupra centrului butonului până când se fixează, după care eliberați butonul.
- Verificați dacă mandrina este fixată corect, printr-o ușoară mișcare axială la fiecare schimbare a instrumentului.

3. Scoaterea mandrinei

- Aplicați presiune cu degetul mare în centrul butonului de apăsare și, în același timp, scoateți mandrina.

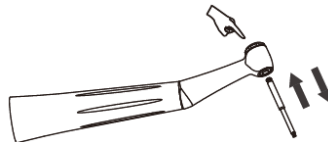

4. Ajustare:

- Rotiți butonul pentru a roti indicatorul la nivelul cuplului dorit. Cheia dinamometrică are 6 poziții.

5. Operare

- Țineți contraunghiul de strângere cu mâna stângă și rotiți baza în sensul acelor de ceasornic cu mâna dreaptă pentru a acționa mandrina și a începe lucrul;
- Atunci când este atinsă limita cuplului, se aude un clic, indicând faptul că declanșarea a avut loc și că a fost atins cuplul selectat.

【Curățare, dezinfectare și sterilizare】

1. Curățare

- Dispozitivul trebuie curățat imediat după intervenție.
- Cheia dinamometrică poate fi curățată folosind o perie sub jet de apă.

2. Dezinfectare

- Dezinfectare externă cu ajutorul unui spray sau a unui șervețel umezit cu produse dezinfectante controlate microbiologic (pH între 2,5-9).
- Folosiți exclusiv soluții detergente sau dezinfectante cu un pH neutru sau ușor alcalin. Este foarte contraindicat să folosiți produse care ar putea fixa proteinele X pe unitate, cum ar fi alcoolul sau aldehidele.
- Nu utilizați dezinfectanți care conțin substanțe alcaline și clor.
- Nu imersați cheia dinamometrică într-o soluție dezinfectantă sau într-un recipient pentru ultrasunete.


3. Sterilizare

- Dezasamblați cheia dinamometrică și apoi utilizați pungi de sterilizare adecvate pentru instrument.
- Cerințe minime: 3 min la 134 °C, timp de sterilizare: 250

 **Atenție:** Asigurați-vă că produsul este complet uscat; dacă există apă reziduală, uscați-o folosind aer presurizat de calitate medicală.

【Întreținere】

- Consultați capitolul „Curățarea, dezinfectarea și sterilizarea” pentru întreținere.
- Mențineți la distanță de orice sursă de căldură sau aprindere. În mod special, este interzis fumatul!
- Puneți o duză tip turbină (P/N 1933X) pe recipientul de pulverizare.
- Lubrifierea trebuie efectuată înainte de prima utilizare și înainte de fiecare sterilizare.
- Introduceți duza pulverizatorului în orificiul situat pe partea din spate a contraunghiului sau a mânerului.
- Mențineți capul pulverizatorului împotriva instrumentului până când presiunea se reduce. Pulverizați timp de 1 până la 2 secunde. Uleiul va acoperi întregul instrument, funcționând ca un agent de curățare și lubrifiere. Lubrifierea trebuie realizată înainte de fiecare sterilizare folosind un spray cu pulverizator.

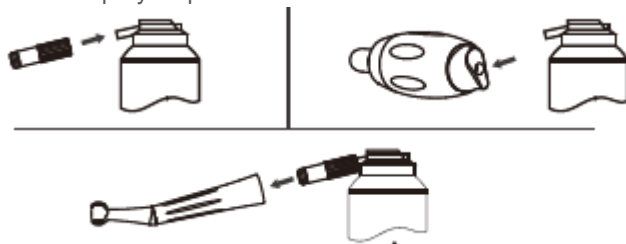

【Specificații tehnice】

Valorile cuplului	10-35N.cm	Greutate (g)	150g
Raportul de viteză	1.25:1	Lungime	18cm
Diametrul instrumentelor (mm) în conformitate cu NF EN ISO 1797-1			2.35

【Mediu de operare, condiții de depozitare și transport】

1. Mediul de operare

2. Condiții de depozitare și transport



Temperatura de funcționare	5°C— 40°C	Temperatura de depozitare	-10°C—55°C
Umiditate de funcționare	20%— 80%	Umiditatea de depozitare	≤93%
Presiunea atmosferică	86kPa — 106kPa	Presiunea atmosferică	50kPa — 106kPa

【Simboluri】

	Avertizare/ Atenție		Producător		Consultați instrucțiunile de utilizare		Număr de serie
	Parte aplicată de tip B		A se păstra uscat		Această parte în sus		Fragil, manipulați cu atenție
	Sterilizabil într-un sterilizator cu abur la 134 °C		Produsele sunt conforme cu directiva DEEE		curățare termică		

【Garanție】

- Contraunghiul de strângere și mânerul beneficiază de o garanție de 12 luni, în timp ce alte accesorii nu sunt incluse în garanție.



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd.

No. 17, Guangming Ave., New Light Source Industrial Base, Nanhai National High-tech Zone, Foshan 528226, Guangdong R.P. China

ChinaTel:0757-66692058

Web: www.coxotec.com

Versiune: 1.1 Data: 20230801