


Diagramă de instalare motor electric fără perii de uz stomatologic (încorporat)

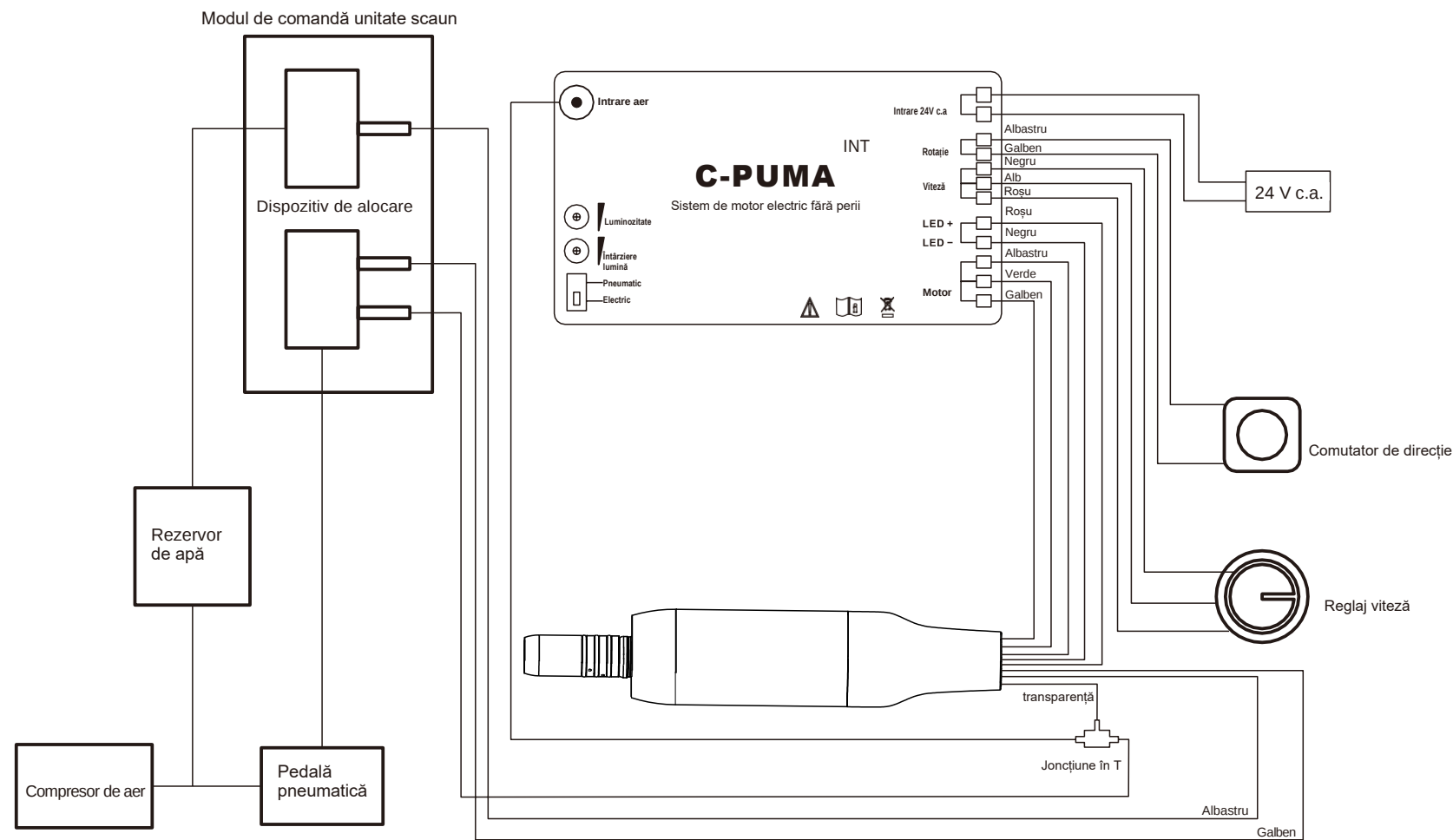

Motor electric fără perii de uz stomatologic (încorporat)

C-PUMA^{INT} Instrucțiuni de instalare




Configurație standard

Cutie de comandă	1
Cablu motor	1
Inel de etanșare	3
Pompă cu piston axial	1
Cablu de comandă	1
Cablu electric	1
Joncțiune în T	1
Instrucțiuni de instalare	1
Etichetă de identificare	1
1: 1 piesă de mână cu canal interior din fibră optică (opțional)	1
1: 5 piesă de mână din fibră optică (opțional)	1

Parametri tehnici

1. Putere:	150W
2. Cutie de comandă, tensiune de intrare:	24V c.a.
3. Domeniu de viteză:	2.000 - 40.000 rpm
4. Cuplu de ieșire:	2.0 N.cm
5. Temperatură ambientală:	-10~+55°C
6. Umiditate:	20~80% RH
7. Presiune atmosferică:	86~106kPa
8. Protecție la șocuri electrice:	Tip B

Instalare

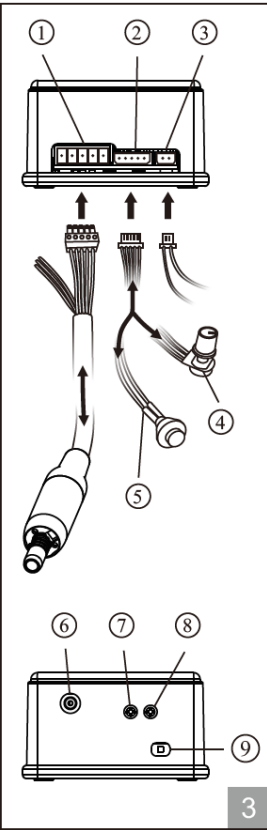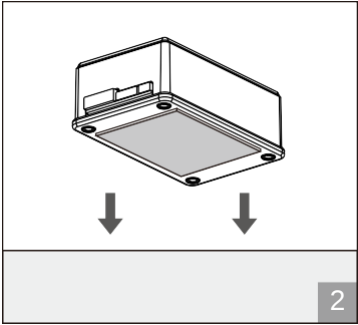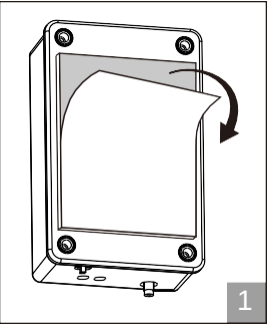

- ① Port motor
- ② Port cablu de comandă
- ③ Port cablu electric
- ④ Reglați viteza de rotație a motorului (domeniu de reglare: 2000-40000rpm)
- ⑤ Comutați direcția de rotație a motorului
- ⑥ Port de detecție pentru controlul presiunii pneumatice
- ⑦ Reglare luminozitate
- ⑧ Reglarea timpului de oprire a întârzierii luminii (Domeniu de reglare: 0-5sec)
- ⑨ Buton mod de pornire (trageți butonul la stânga pentru a alege modul pneumatic, trageți-l la dreapta pentru a alege modul electric)

1. Folosiți pârghia din cauciuc din partea de jos a cutiei de comandă pentru fixarea cutiei de comandă la interiorul raftului de instrumente al scaunului stomatologic. Conform ilustrațiilor din figura 1 și figura 2)
2. Conectați cablurile la portul corespundent de pe cutia de comandă. (Conform ilustrației din figura 3)
3. Partea de funcții a cablului motorului și linia de comandă sunt fixe la exteriorul raftului de instrumente al scaunului stomatologic.

⚠ Notificare

1. În modul pneumatic, când ⑥ a depistat presiunea de intrare și ④ e mai mare decât zero, motorul va porni în modul electric. Când ④ este mai mare decât zero, motorul va porni.
2. Modul formal de lucru al sistemului folosește comanda pneumatică, metodele electrice sunt folosite în general numai în scopuri de depanare și testare.
3. Dacă doriți să folosiți pentru unitate sursa de alimentare electrică de pe scaunul stomatologic, asigurați-vă că puterea de ieșire a scaunului stomatologic este mai mare de 250 w.



Curățare și sterilizare

Se recomandă sterilizarea la temperatură și presiune ridicate. De fiecare dată după tratament, urmați metodele de mai jos pentru inițializarea sterilizării la temperatură și presiune ridicate. Numai partea motorului este disponibilă pentru sterilizarea la temperatură și presiune ridicate.

⚠ Notă:


În afară de piesele disponibile pentru sterilizare la temperatură și presiune ridicate, vă rugăm să nu supuneți la sterilizarea la temperatură și presiune ridicată celelalte (unitatea principală, cablul electric).

1. Folosiți o perie (nu perie de sârmă) pentru a curăța murdăria prinsă de suprafața motorului.
2. Nu ungeți motorul cu ulei. Instalați pompa cu piston axial pe motor.
3. Introduceți-l în pungă și sigilați-o pentru sterilizarea la temperatură și presiune ridicate.
4. Folosiți o temperatură nu mai mare de 135 °C pentru sterilizare.
(cum ar fi: 121 °C 20min sau 134 °C 15min).

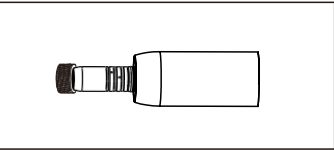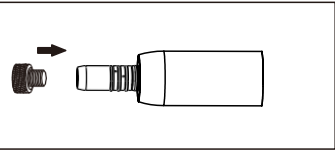

Atenție la sterilizarea la temperatură și presiune ridicate

1. Înșurubați capacul motorului pe motor și dopul de protecție pe racordul motorului

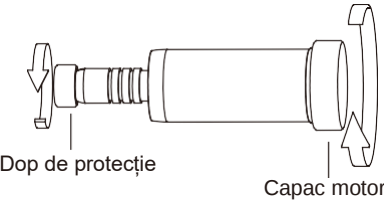

Post-vânzări

Unitatea principală are o garanție de 12 luni de la data cumpărării.
Garanția este valabilă numai pentru condiții normale de utilizare. Orice modificare sau avariere accidentală vor anula garanția.