


Motor electric (încorporat)

C-PUMA^{INT+}

Instrucțiuni de instalare

Instalare

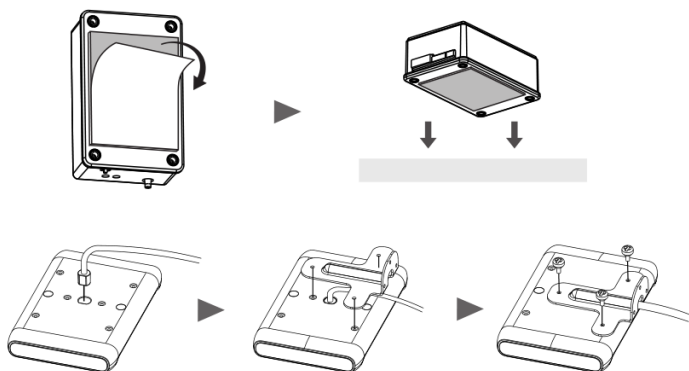


Parametri tehnici

1. Putere: 50VA
2. Cutie de comandă, tensiune de intrare: 24V/4,8A c.a.
3. Domeniu de viteză: 2000-4000rpm
4. Temperatură ambientală: +5~+40°C
5. Umiditate: 20%~80%RH
6. Presiune atmosferică: 860hPa~1060hPa

7. Protecție la șocuri electrice: Tip B


Ecraan tactil LCD

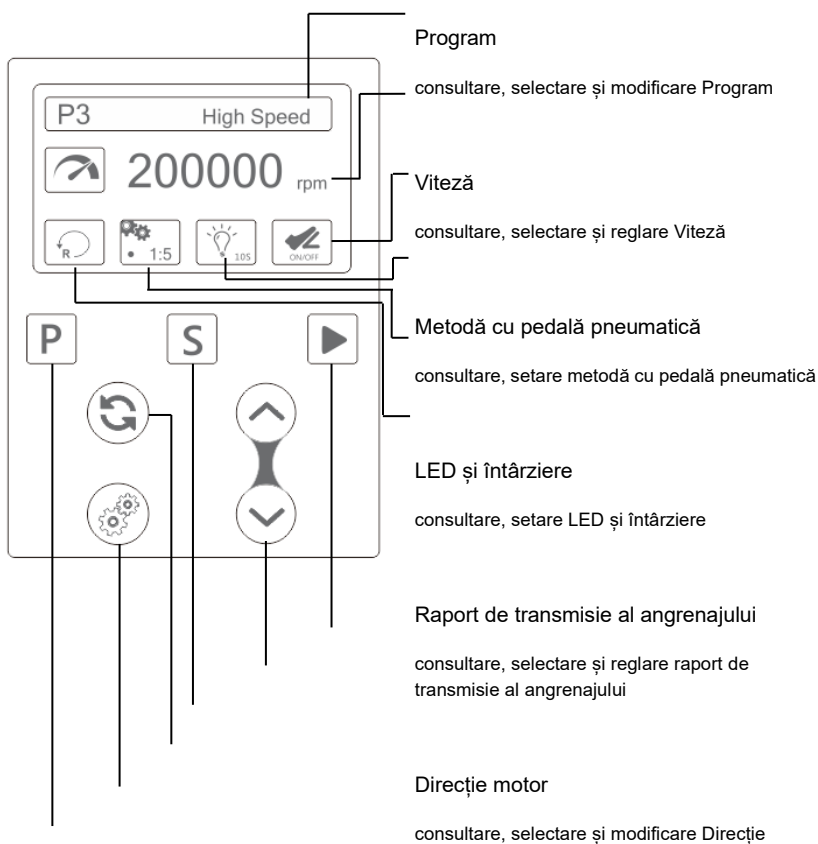

- Buton de pornire manuală
- Buton de mărire/micșorare
- Buton de setări
- Buton pentru direcția motorului
- Buton pentru raportul de transmisie al angrenajului
- Buton de programe


Selectare și modificare

1. Program

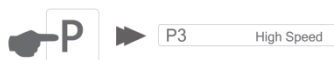

Program	Setări implicite
P1 My favorite 1 (Preferat)	
P2 My favorite 2 (Preferat)	
P3 Tooth prep (H) (Pregătire dinte)	1:5 200000 rpm
P4 Tooth prep (L) (Pregătire dinte)	1:5 20000 rpm
P5 Contra angle (Contra unghi)	1:1 40000rpm
P6 Straight (Drept)	1:1 40000rpm
P7 Polishing (Lustruire)	1:1 5000rpm

2. Viteză

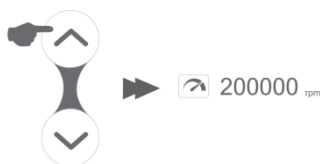

Raport de transmisie al angrenajului	Domeniu de viteză (rpm)
1:5	10000-200000
1:1	2000-40000
4:1	500-10000
10:1	200-4000
16:1	100-2500
20:1	100-2000

3. Direcție



	Înainte
	Înapoi

4. Raport de transmisie al angrenajului



Raport de transmisie al angrenajului					
1:5	1:1	4:1	10:1	16:1	20:1

Setare

1. Mod de setare



Apăsați **S** pentru selectarea elementului

Apăsați   pentru setarea parametrului

2. LED și întârziere



LED stins



Nicio întârziere



Întârziere de 10 sec

3. Metodă cu pedală pneumatică



ADJUST

Valoarea comandată a vitezei este o funcție (liniară) în raport cu presiunea aplicată.



ON/OFF

Viteza comandată este egală cu viteza maximă odată ce este apăsată pedala.

4. Presiune pneumatică de intrare



Min 0.10 Mpa

Presiune pneumatică min. de intrare 0,03-0,10MPa



Max 0.40 Mpa

Presiune pneumatică max. de intrare 0,20-0,40MPa

Curățare, dezinfectare și sterilizare

Folosiți o cârpă de unică folosință umezită și ștergeți toate suprafețele vizibile ale motorului și cablurile de legătură.

Folosiți o cârpă de unică folosință moale și un produs aprobat pentru dezinfectare și dezinfectați prin ștergerea tuturor suprafețelor vizibile ale motorului și cablurile de legătură.




Piese următoare pot fi sterilizate:


Motor fără cablu

Autoclavați la previd fracționat de 3 ori:

- Cel puțin 3 minute la 134°C
- Timp de uscare: 20 min.

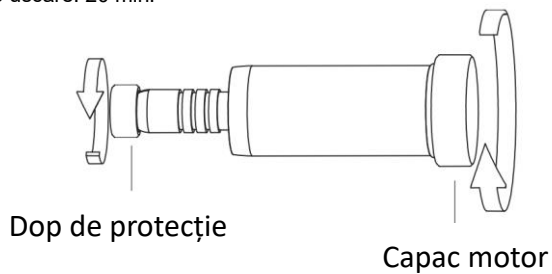

Diagramă de instalare motor electric fără perii de uz stomatologic (încorporat)

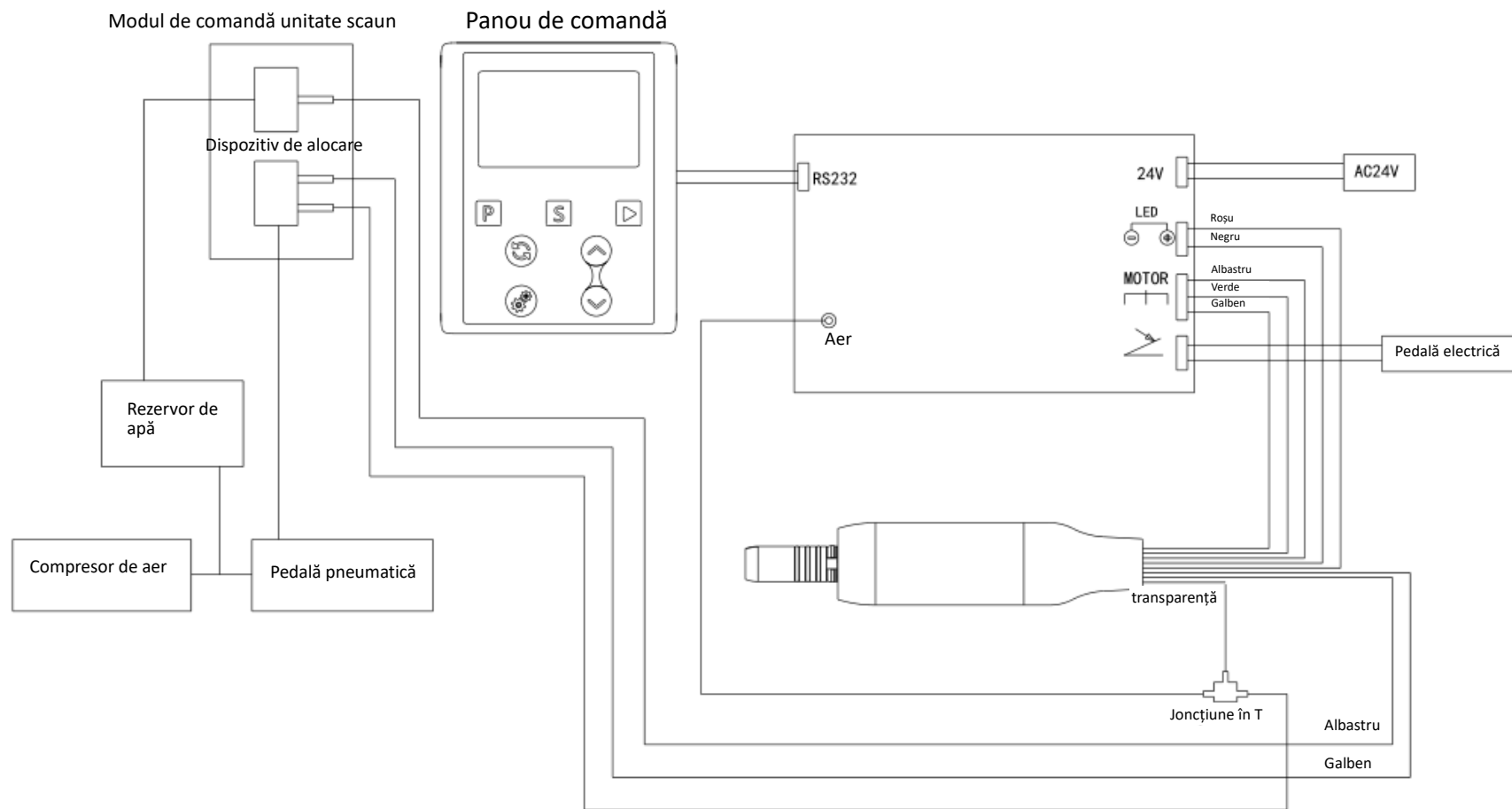

Ver1.0 Data revizuirii: 2018-05-15