

Medii de utilizare și depozitare

Temperatură de funcționare +5 ° C până la +40 ° C
Umiditate de funcționare: 20% RH până la 80% RH
Presiune de funcționare: 86kPa până la 106kPa
Temperatură de depozitare: -10 ° C până la +55 ° C
Presiune de depozitare: 50kPa până la 106kPa
Umiditate de depozitare: ≤93%RH

Garanția produsului

Perioadă de garanție lampă cu LED stomatologică: 12 luni.

Listă de colisaj

Lampă cu LED x 1

Mâner x 2

Capac decorativ x 1

Cheie hexagonală x 1

Simboluri standard



Atenție



Număr de catalog



A se păstra uscat



Consultați manualul/
broșura de instrucțiuni



DEEE



Reprezentant pentru
Uniunea Europeană



Numai pentru utilizare la
interior



Fragil



Produs cu marcaj CE



Vertical în sus



Producător



Număr LOT

LOT YMX

X Lot reprezentativ (reprezentat de A, B și, respectiv, C)
M Lună reprezentativă (1-9 pentru ianuarie-septembrie, octombrie-decembrie pentru A, B și respectiv C)
Y An reprezentativ (F este 2015, G este 2016 ș.a.m.d.)
Semn numărul lotului
De exemplu, H9A reprezintă numărul lotului de producție al primului lot din septembrie 2017.

COXO®



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd.
CLĂDIREA 4, Districtul A Guangdong, Baza industrială New Light Source, La sud de
Bulevardul Luocun, Districtul Nanhai Foshan 528226 Guangdong China.



Lotus NLB.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, Haga, Olanda.
E-mail: peter@lotusnl.com

Ver1.2 Data revizuirii: 2020-12-05

GHID DE UTILIZARE



AVERTISMENT

- Funcția lămpii stomatologice este de a ilumina cavitatea bucală a pacientului în timpul operațiilor stomatologice.
- Lampa stomatologică trebuie utilizată de personal calificat.
- Instalarea sistemului trebuie efectuată numai de personal specializat.
- Verificați ca tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța de date să corespundă cu tensiunea de alimentare din rețea.
- Nu blocați fasciculul de lumină al lămpii stomatologice pentru pacienții de risc (de ex., cu afecțiuni oculare). Folosiți măsuri de precauție și protecție corecte.
- Lampa stomatologică trebuie instalată pe un dispozitiv specific de control și alimentare, cum ar fi o unitate stomatologică sau cu un sistem electric conform cu standardul CEI 364-1 și „reglementările naționale pentru instalarea sistemelor electrice în zone de uz medical”.
- Nu efectuați nicio lucrare de întreținere când este sub tensiune. Deconectați cablul de la rețeaua electrică în prealabil.
- Nu introduceți articole sau instrumente în fantele capului lămpii stomatologice care ar putea atinge puncte sub tensiune.
- Pacienții la risc (de ex., copii cu boli oculare) nu trebuie să privească direct în fasciculul lămpii stomatologice.
- Folosiți întotdeauna măsuri de precauție și protecție corecte. Producătorul recomandă folosirea de echipamente de protecție pentru ochi BLUE-BAN sau BABY BLUE-BAN (pentru copii).
- Nu este adecvată pentru instalarea în medii cu gaze inflamabile.
- Nu pulverizați detergenți-dezinfectanți direct pe capul lămpii.
- Pentru curățarea pieselor din plastic ale lămpii stomatologice, Nu folosiți detergenți-dezinfectanți care conțin: HIDROXID DE AMONIU - HIDROXID DE SODIU - CLORURĂ DE METILEN - ALCOOL METILIC
Neconformarea la această indicație poate crea riscul de spargere a pieselor din plastic.
- Nu efectuați lucrări de întreținere sau de înlocuire a pieselor în afara celor indicate în manual.
Orice operație care nu este indicată în manual poate compromite siguranța dispozitivului.
- Dezinfectați suprafețele cu dezinfectanți hidroalcoolici.
- Stomatologul este obligat să folosească manșoanele de protecție de unică folosință pe mânerul lămpii stomatologice pentru a asigura sterilitatea versiunilor nesterile.


Date tehnice

1. Tensiune de alimentare (fără transformator): 12-24V, 50/60Hz C.A.
2. Putere absorbită: 12VA
3. Lux: 3000-35000lux (spot la distanță 700mm)
4. Dimensiuni spot luminos: 170x80mm (spot la distanță 700mm)
5. Temperatura culorii: 5000-5300K
6. Dimensiuni arbore: 22mm
7. Greutate netă: 2,0Kg

Destinația utilizării

Produsul este destinat iluminării pentru stomatologi în timpul operațiilor chirurgicale orale sau pentru diagnosticare.

Structură și alcătuire


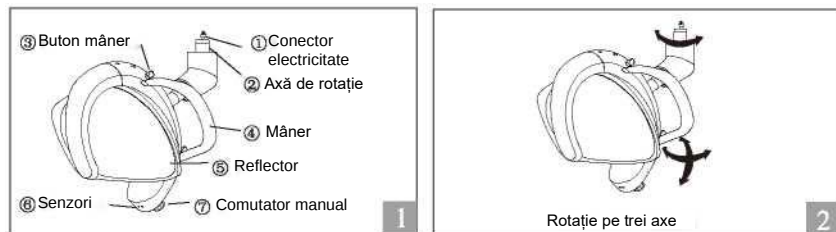


Instalare

1. Montarea și demontarea mânerului:

Conform ilustrației din Fig. 3,

- Introduceți mânerul ④ în jack-ul de mână ⑥
- Fixați butonul mânerului ③
- Pentru scoaterea mânerului, desurubați butonul mânerului , ③ * și scoateți mânerul ④.

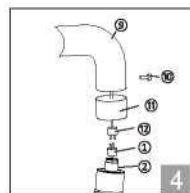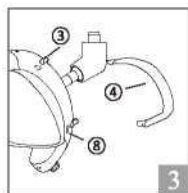

2. conectare la conectorul sursei de alimentare electrică:

Conform ilustrației din Fig. 4,

- Puneți ⑪ pe ⑨ ;
- Conectați ① și ⑫ ;
- Introduceți ② în ⑨ și fixați cu ⑩ .



Atenție:

- * Înainte de instalare, confirmați că alimentarea electrică este de 12-24V C.A.
Altminteri, lampa va fi avariata.
- * Forța brațului lămpii stomatologice trebuie să fie de peste 2,0Kg.

Instrucțiuni de utilizare



Această lampă stomatologică are moduri de comandă manuală și cu senzori.

1. Pornire și oprire

- Comutator manual: Apăsăți butonul pentru pornire și oprire, conform ilustrației din Fig.5
- Senzori: Apropiati-vă de senzori până la o distanță maximă de 80 mm, conform ilustrației din Fig.6

2. Reglarea intensității luminii

- Comutator manual: Rotiți „Comutatorul Manual” în sensul acelor de ceas sau în sens contrar acelor de ceas conform ilustrației din Fig.5. Când atinge limita de intensitate, aparatul va emite un semnal sonor. Comutatorul manual trebuie manipulat cu delicatețe ca să nu se rupă.
- Senzori: Plasați mâna în dreptul senzorului până la atingerea intensității dorite, de la nivelul maxim la cel minim și de la nivelul minim la cel maxim, conform ilustrației din Fig.5. Când atinge limita de intensitate, aparatul va emite un semnal sonor.
- La aprinderea lămpii stomatologice, intensitatea va fi la nivelul memorat când a fost stinsă ultima dată.

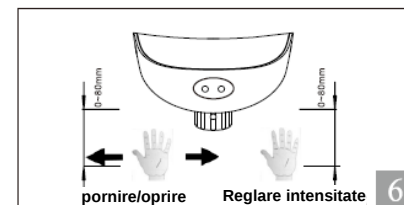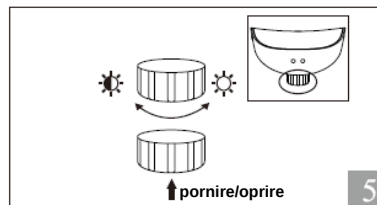

Curățare și dezinfectare

1. Pentru curățare, producătorul recomandă folosirea de detergent. Curățați cu o cârpă moale și alcool izopropilic.
2. Nu folosiți detergenți cu conținut de surfactanți sau agenți rezistenți la apă, ale căror acumulări pot lăsa urme.
3. Dezinfectanții hidroalcoolici cu 70% alcool izopropilic sau alcool etilic sunt adecvați pentru dezinfectare.
4. Pentru curățarea pieselor din plastic, Nu folosiți detergenți-dezinfectanți cu conținut de hidroxid de amoniu - hidroxid de sodiu - clorură de etilenă - alcool metilic.
5. Urmele ușoare nu afectează calitatea luminii.
6. Mânerele trebuie sterilizate 15 min la 121°C sau 4 min la 135°C.



Atenție:

- * Lampa stomatologică cu LED nu poate fi sterilizată.